



본 제품의 사용 전 사용설명서를 숙지 후 사용하시기 바랍니다.

본 제품은 **의료기기**이므로 의료기기 취급자만이 판매 및 사용할 수 있습니다.

본 제품은 비 멸균상태로 제공되므로 **멸균 후 사용**하여야 합니다.

// 사용목적 //

골수술 시 절골, 절제, 천자, 천공 등에 사용하는 수동식 수술기구

// 사용방법 //

- 1) 사용전에 보관상태를 확인한 후, 반드시 기구를 멸균 후 사용한다.
멸균방법은 고압증기 멸균법으로 확인하여 사용한다.
(멸균조건: 1기압, 135℃, 20~30분 동안 멸균)
- 2) 부위별로 필요한 기구를 정확히 확인하여 사용한다.
- 3) 수술이 종료된 후, 모든기구를 청결히 소독해야 한다.
- 4) 장기간 사용하지 않을 때는 습기나 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 보관한다.
- 5) 재사용 시 1)~3)의 과정을 반복하여 사용한다.

// 사용 시 주의사항 //

- 1) 외관의 이상유무를 확인하고 안전한 기구를 사용해야 한다.
- 2) 사용시 다른 부위에 손상이 가지 않도록 주의한다.
- 3) 기구를 사용할 때는 소독여부를 확인하고, 손상된 기구를 사용하지 않는다.
- 4) 사용후 다른 기구와 충돌이 없도록 보관한다.
- 5) 드릴 비트의 날 부위는 매우 예리하게 날카로우니 주의해서 사용하고 안전에 주의할 것.

// 기호에 대한 설명 //

기호	설명	기호	설명
	제조번호		제조사
	카달로그 번호		제조일자
	비 멸균		주의
	사용설명서 참조		수량